

Multiplate analys

Klinisk immunologi och
Transfusionsmedicin
Akademiska Sjukhuset

Namn och personnummer

- **Senaste B-trombocyt-värde:** _____
TPK-värde ska vara över $50 \times 10^9/L$ för analys

- **Pågående blödning?** Ja Nej

- **Behandlad med trombocythämmande läkemedel** Ja Nej

Vilken/vilka? _____

OBS! Prov ska tas i 2 st Hirudinrör, 1,6 mL. Kontakta blodcentralen vid behov av rör.

Prov taget

Datum: _____

Tid: _____

Beställande avd: _____


Debiteras avd: _____

Provet lämnas på blodcentralens akutlab, ing. 61 2tr. Får ej skickas i rörpost.


Provtagning med Sarstedts Monovette-rör för Multiplate-analys



1. Klistra etikett med namn och personnummer så att kolven i röret syns väl.

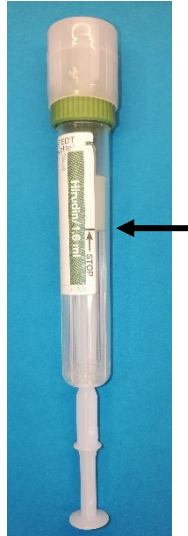

2. Skapa vakuum i röret genom att dra ned sprutan tills den snäpper fast. Nederdelen av kolven ska var i höjd med den svarta pilen.

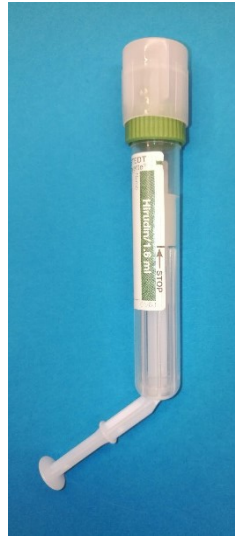

3. Bryt av sprutan när kolven är fast på plats alt. efter att provröret har fyllts.



4. Provröret kan nu användas som ett vacutainerrör. OBS! Provröret bör hållas på plats under provtagningstiden för att säkerställa att röret fylls.